
ORTHOLY UNIVERSAL BONDTM




プライマー含有による高い接着性 次世代型ワンペーストボンディング材

あらゆるブラケットに対応する ユーティリティ性の高い接着性能

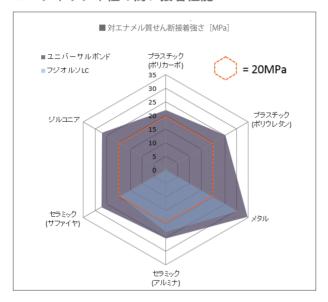


プライマー含有ペーストにより 歯面とベース面に安定して接着

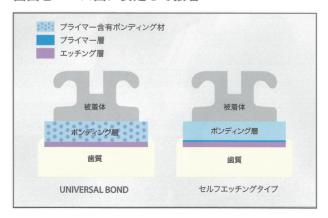


ペースト中にリン酸エステルモノマーを含有しているため安定した接着力を得ることができます。

歯質に優しいジェル状の 新しい歯面処理材(エッチャント)

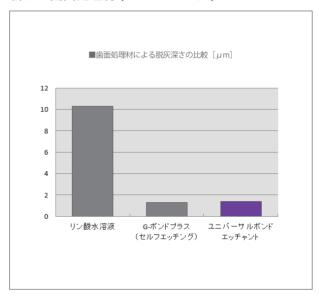

歯面に残存したボンディング材も UV 照射により簡単に識別可能

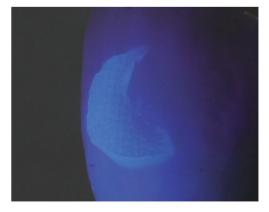

光照射によって蛍光材が発色し、残存ボンディングを容易に識別する ことができます。

ボンディングステップ



研磨ペーストをブラシ又はカップに取り 歯面を清掃し、接着部位のプラークを取り 除きます。その後、水洗・乾燥を行います。



接着部位にユニバーサルボンドのエッチャントを塗布します。



30 秒後に水洗を行いエッチャントを除去します。



乾燥を行い充分に防湿します。 被着面が補緩物の場合、表面を粗面化し 水洗・乾燥を行った後に、それぞれの材質に 合ったプライマーを塗布してください。



ユニバーサルボンドのボンディングをブラ ケットベース面に直接塗布します。



ブラケットを接着面に静かに圧接し、適正な 位置に調整します。過剰にはみ出たボン ディング材はスケーラーやエキスプローラー で光照射前に除去します。



2 方向以上から各 20 秒間光照射を行います。 (ハロゲン照射器の場合) LED (G ライト):10 秒 キセノン (フリッポ):6 秒



セット後はすぐにワイヤーを装着できます。

舌側矯正での使用例 (コモンベース併用)



歯面清掃後、エッチャントを塗布します。



乾燥後、防湿します。



ボンディング後、 光照射します。



セット後の状態です。



ブラケット用ボンディング材

オルソリー ユニバーサルボンド スターターセット(クリア)

包装●ボンディング 2mL 1本、エッチャント 3.6mL 1本、UB 用チップ 2 個、UB 用キャップ 1 個、オルソリーニードルチップ (黒) 20 個管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 23AAB7X00073000

単品包装

ボンディング (クリア)

包装●ボンディング 2mL 2 本、UB 用チップ 4 個、UB 用キャップ 2 個

エッチャント

包装●エッチャント 3.6mL 2 本、オルソリーニードルチッップ (黒)40 個

関連製品|ブラケット用ボンディング材



ブラケット用ボンディング材

オルソリー ユニバーサルボンドフロー スターターセット

色調●2 色=クリア、ピンク

包装●ボンディング 2mL1本、SE ブライマー5mL1本、ディスポーザブルアプリケーター II 50本、ディスポディッシュ 20枚、フィリングチップ III プラスチック 2 個、フィリングチップ 用キャップ 1 個

管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 230AABZX00107000

ブラケットベース用レジン



ブラケットベース用レジン

オルソリー コモンベースレジン

色調●2 色=(LV) クリア、ピンク / (HV) クリア 包装●コモンベースレジン 2.7g(2mL)2 本、 フィリングチップIII ブラスチック 4 個、 フィリングチップ用キャップ 1 個 管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 23AABXW0071000

で使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

発 売 株式会社 ジーシー オルソリー

東京都板橋区蓮沼町 76-1

製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプログクツ

愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

フリーダイヤル 00 0120-108-171

受付時間●10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

ジーシーオルソリー ホームページ

www.gcortholy.com

Your smile makes us happy.

Printed in Japan. OR007T1906