ORTHOLY STATES IN STATES OF THE STATES OF T




優れた粘靭性と適度な磨耗性を兼ね備えた ブラケットベース築盛のためのレジン誕生。

従来のコンポジットレジンにはない粘靭性

強さとしなやかさを兼ね備えた特性により作業模型から安心してブラケットベースを取り外すことができます。


■曲げ靭性比較試験

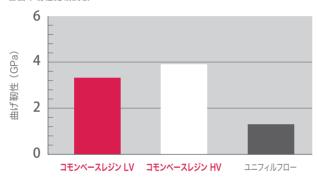

エナメル質へのより安定したボンディングが可能

コモンベースのレジン面が歯面を覆うことにより接着面積が増し、安定した高い接着力を発揮します。また、グラスアイオノマー系ボンディング材と組み合わせることにより防湿の難しい部位にもで使用いただけます。


■対エナメル質せん断接着強さ比較試験

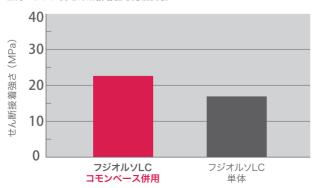

ボンディング後は適度に磨耗


ボンディング時にはポジショニングするために咬頭などを覆う エクステンション部分もセット後の咬合干渉時には適度に磨 耗するユニークな設計。

■3体磨耗試験

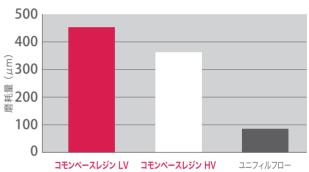

低粘度タイプ(LV)、高粘度タイプ(HV)の 2種類をラインナップ

薄く伸ばしながらエクステンション部位を作製するのに適した低粘度タイプ(LV)と、作業模型とブラケットベースのスペースを確実に埋めることができる高粘度タイプ(HV)の2種類を用途に合わせて使い分けることができます。

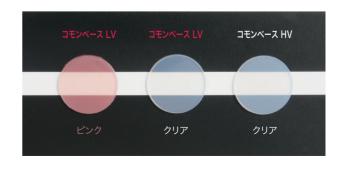


技工ステップ



コモンベースレジンHVをブラケット/ チューブのベース面アンダーカットに入り 込むように塗布します。



ブラケット/チューブをソーピングした作業模型上で適正な位置にポジショニングします。

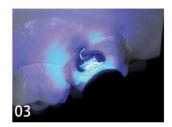

光照射をして模型上でブラケット/チューブ の位置を固定します。



コモンベースレジンLVを模型上に追加し、 探針を使用してエクステンション部分を作 製します。



エクステンションはブラケット/チューブ が近遠心かつ垂直方向に安定するように 作製します。



レストは垂直的位置を確実に規定できますが、対合歯との干渉を避けるように留意します。



エクステンションの築盛が終わったら2方 向以上から各20秒間の光照射を行いま す。(ハロゲン照射器の場合)



完成したコモンベースを慎重に作業模型から撤去し、再度、適合状態を確認します。

臨床ステップ



接着歯面を十分に清掃し、オルソリーグラスボンドジェルコンディショナーによる歯面処理を行った後、オルソリーグラスボンドをコモンベースに塗布します。



スパチュラなどを用いてオルソリーグラス ボンドを薄く均一にのばします。



補綴処置されている部位にはサンドブラストおよび各種プライマーを用いて前処理を行います。コモンベースを探針で静かに圧接すると適切な位置に誘導されます。余剰なオルソリーグラスボンドは探針で除去します。



前歯部も同様のステップでボンディング 操作を行います。

色々な矯正装置に使える「KommonBase™」の臨床応用例




(症例1) 形態異常歯へのチューブの装着



(症例2) 固定式リテーナー



(症例3)トランスパラタルアーチ

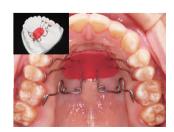

(症例4) ペンデュラム装置





ブラケットベース用レジン

オルソリー コモンベースレジン [_V]

色調●2色=クリア、ピンク

包装●コモンベースレジン 2.7g(2mL) 2本、フィリングチップ III プラスチック 4個、 フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 223AABZX00071000

オルソリー コモンベースレジン HV

色調●1色=クリア

包装●コモンベースレジン 2.7g(2mL) 2本、フィリングチップ ||プラスチック 4個、 フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 223AABZX00071000



健全エナメルをそのままに、 歯質にやさしい 矯正用グラスアイオノマー系接着材。

ブラケット用グラスアイオノマー系レジンセメント

オルソリー グラスボンド スターターヤット

包装●カートリッジ 13.3g (7.2mL) 1本、ミキシングチップ 20本、 ジェルコンディショナー1.4g(1.2mL)3本、ブラシチップ30本

グラスアイオノマーをベースとした新しいタイ プのブラケット用接着材です。リン酸エッチン グを使用する必要がないため、健全エナメル を過度に傷つけない歯質にやさしいシステム です。ミキシングチップの採用により1ペースト 感覚で使えますので操作性にも優れています。

管理医療機器 歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント 単回使用:ミキシングチップ 220AKBZX00106000

で使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあり ます。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

発 売 株式会社 ジーシー オルソリー

製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

00 0120-108-171

受付時間●10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

www.gcortholy.com

Your smile makes us happy.

Printed in Japan, OR005X1109