

ORTHOLY UNIVERSAL BOND™ FLOW

ブラケット用ボンディング材
オルソリー ユニバーサルボンド™ フロー

KommonBase™、インダイレクト法 (IDBS) による ブラケットボンディングに適した接着材




審美的なクリア / 視認性のあるピンク



審美的に適したクリア、舌側や臼歯部での視認性が良いピンクの2色の使い分けが可能。

IDBS に適したフロー、セット後の拡がり

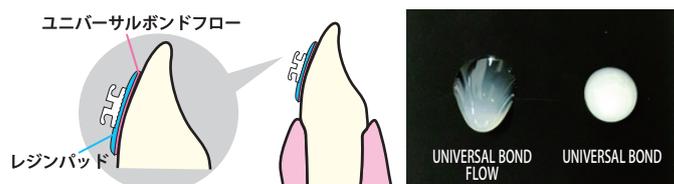


KommonBase やインダイレクト法のボンディングに適したフローを実現。歯面にセットするとレジジンパッドと歯面の間に薄く拡がります。

より歯面にダメージを与えないプライマー

■ユニバーサルボンド SE プライマー




■ジーシーエッチング液 (リン酸水溶液)

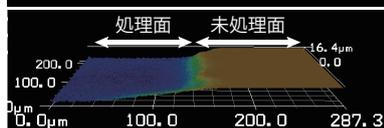

ジーシー研究所測定データ

リン酸エッチング処理よりも歯面にダメージを与えないセルフエッチングプライマーによる歯面処理。

ユーティリティ性の高い接着性能

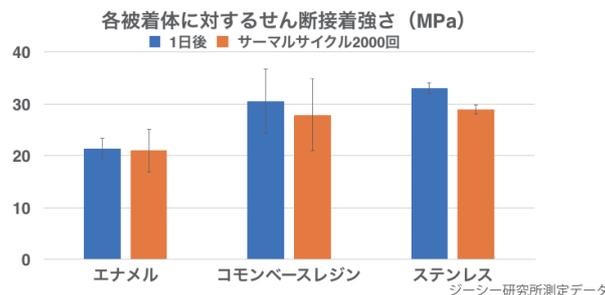

エナメル、レジン、ステンレスの各被着体に対して20MPa以上のせん断接着強さを発揮。

水洗不要のシンプルなボンディングステップ

Kommon Base の場合

- 1 研磨ペーストをブラシ又はカップにとり、歯面を清掃し、接着部位のプラークを取り除きます。
- 2 接着部位にユニバーサルボンドフローSEプライマーを塗布し、10秒間放置します。
※被着面が補綴修復物の場合は、被着面を粗造化して水洗・乾燥した後に、それぞれの材質に合ったプライマー（「G-マルチプライマー」など）を塗布してください。
- 3 放置後、強圧エアで約5秒間乾燥します。
- 4 ユニバーサルボンドフローをレジン榮盛されたブラケットベース面に直接塗布します。
- 5 ブラケットを歯面の接着部位に静かに圧接し、適切な位置に調整します。
- 6 過剰にはみ出したボンディングは、スケーラーやエキスプローラーで光照射前に除去します。
- 7 2方向以上から各10秒間光照射します。（LED照射器の場合）

ユニバーサルボンドフロー 光照射時間

ハロゲン（コピー）	20秒
LED（G-ライト）	10秒
キセノン（フリッポ）	6秒

※G-ライトプリマ II Plusの場合は、6秒（F3モード[3秒]×2回）

13010248
241081DK

インダイレクト法の場合

- 1 通法に従い、ブラケットのポジションニングを決めて、ブラケットを仮止めします。
- 2 透明シリコンを用い、ブラケットのポジションニングをずらさないように注意しながらボンディングトレーを作製します。
- 3 研磨ペーストをブラシ又はカップにとり、歯面を清掃し、接着部位のプラークを取り除きます。
- 4 接着部位にユニバーサルボンドフローSEプライマーを塗布し、10秒間放置します。
※被着面が補綴修復物の場合は、被着面を粗造化して水洗・乾燥した後に、それぞれの材質に合ったプライマー（「G-マルチプライマー」など）を塗布してください。
- 5 放置後、強圧エアで約5秒間乾燥します。
- 6 ブラケットの接着面を十分に水洗、乾燥し、ユニバーサルボンドフローを塗布します。
- 7 ブラケットを固定したトレーを口腔内に戻し、接着します。
- 8 2方向以上から各10秒間光照射します（LED照射器の場合）。過剰にはみ出したボンディングは、通法に従い、インスツルメント、又はバーなどを用いて除去します。

製品仕様



ブラケット用ボンディング材

オルソリー ユニバーサルボンドフロー スターターセット

色調●2色＝クリア、ピンク

包装●ボンディング 2mL 1本、SE プライマー 5mL 1本、
ディスポーザブルアプリーケーター II 50本、ディスポディッシュ 20枚、
フィリングチップⅢプラスチック 2個、フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
230AABZX00107000

単品包装

ボンディング

色調●2色＝クリア、ピンク

包装●ボンディング 2mL 2本、
フィリングチップⅢプラスチック 4個、
フィリングチップ用キャップ 2個

SE プライマー

包装●SE プライマー 5mL 1本

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

●色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。●製品仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。●掲載の臨床写真は臨床例で製品の効能・効果を保証するものではありません。

発売元 **株式会社 ジーシー オルソリー**
東京都板橋区蓮沼町76-1

製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

お客様窓口 **0120-108-171**
受付時間●10:00～16:00（土・日・祝を除く）

ジーシーオルソリー ホームページ

www.gcortholy.com

Your smile makes us happy.